




MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

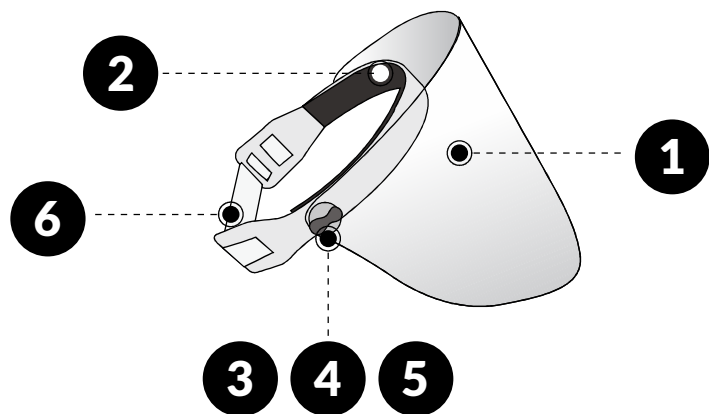

(1) Schutzvisier

(Im Set AX MED PKM+1 ist ein Ersatzvisier im Lieferumfang enthalten)
Visier-Abmessungen (BxH): 378 x 209 mm

(2) Trägerband mit CE-Zeichen

und Schaumgummi im Stirnbereich

(3,4,5) Befestigungssatz für beide Seiten

Bestehend aus
2 x Befestigungsschraube
2 x Distanzring
2 x Befestigungsmutter

(6) Flexibles Gummiband

MONTAGE

Abbildung 1:
Das Set besteht aus den abgebildeten Teilen.

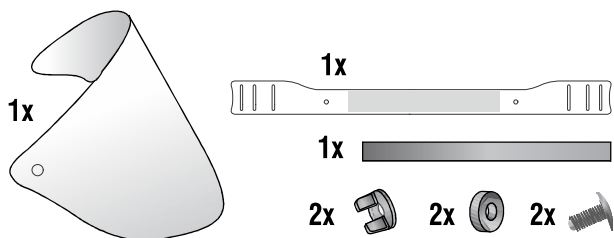


Abbildung 2:
Befestigen Sie das Gummiband auf beiden Seiten an dem Trägerband.
Nach dem Anpassen an den Kopfumfang kann überschüssiges Material abgeschnitten werden.


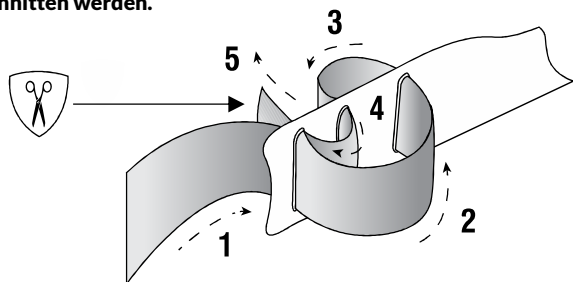


Abbildung 3:
Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten des Schutzvisiers.

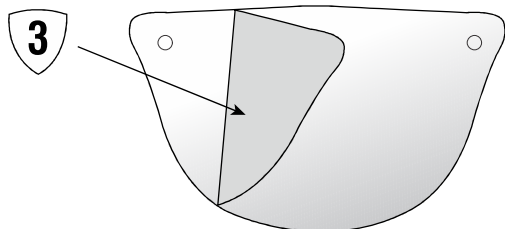

1. Prüfen Sie zunächst den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (Abb. 1).


2. Befestigen Sie das Gummiband auf beiden Seiten an dem Trägerband. Halten Sie sich hierbei bitte genau an die Vorgaben (Abb. 2). Nur so ist eine optimale Befestigung des Gummibandes an das Trägerband gewährleistet. Jetzt passen Sie Gummiband und Trägerband an Ihren Kopfumfang an. Achten Sie auf bequemen Sitz. Überschüssiges Gummiband kann abgeschnitten werden.

WICHTIG!

Achten Sie bitte darauf, dass Sie das Gummiband nicht zu kurz abschneiden. Es sollte auf beiden Seiten mindestens 1 cm Material verbleiben, damit das Gummiband nicht aus dem Trägerband herausrutschen kann.

3. Entfernen Sie nun die Schutzfolie auf beiden Seiten des Plastikvisiers (Abb. 3)

Abbildung 4:
Befestigen Sie das Schutzvisier mit den Schraubensätzen am Trägerband.

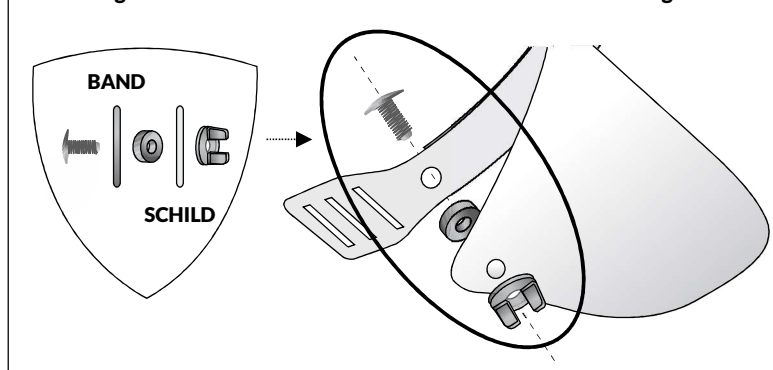

4. Befestigen Sie das Plastikvisier nun am Trägerband. Achten Sie dabei auf die genaue Reihenfolge der mitgelieferten Befestigungselemente (Abb. 4). Die Schraube wird von der zum Kopf gewandten Seite des Trägerbandes durchgesteckt. Der Distanzring wird zwischen Trägerband und Schutzvisier montiert. Nun das Schutzvisier mit der Mutter am Trägerband befestigen. Dieser Vorgang wird auf beiden Seiten durchgeführt. Ziehen Sie auf beiden Seiten die Schrauben fest. Achten Sie dabei darauf, dass sich das Klappvisier noch gut rauf- und runter klappen lässt. Dies ist über die Schraubbefestigung einstellbar.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Es dürfen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden.

ANWENDUNGSBEREICH:

Das Klappvisier kann zusätzlich zu einem Mund-Nasen-Schutz und auch mit Brille getragen werden. Es erhöht den Schutz der Augen und des Gesichts, insbesondere auch vor dem Kontakt mit den Händen. Das Klappvisier soll primär die Verbreitung von Tröpfchen aus dem Nasen-Rachen-Raum des Trägers verhindern. Gleichzeitig soll er den Träger vor Spritzern mit Körperflüssigkeit des Gegenübers schützen. Das Klappvisier bietet keinen Schutz vor eigener Ansteckung, kann aber verhindern, dass Infizierte die Krankheit weiter verbreiten. Darüber hinaus ergänzt es den Schutz von Augen und Gesicht vor dem Kontakt mit Händen oder anderen potenziell infizierten Personen.

RICHTIGE ANWENDUNG

Eine ungenaue Positionierung des Klappvisiers auf dem Kopf kann zu Beschwerden wie Kopfschmerzen oder auch Stürzen führen. Um dies zu verhindern ist das Klappvisier durch das mitgelieferte elastische Gummiband einstellbar und kann jedem Kopfumfang individuell angepasst werden. Auf der zum Kopf gewandten Seite ist das Trägerband des Klappvisiers mit Schaumgummi ausgestattet. Das erhöht den Tragekomfort und schützt vor unangenehmen Druck des Trägerbands auf die Stirn. Achten Sie darauf, dass das Klappvisier nach der Montage optimal an Ihren Kopfumfang angepasst ist, um den maximalen Tragekomfort zu erzielen.

PRODUKTWARTUNG UND PFLEGE

Das Klappvisier sollte regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Es empfiehlt sich, dass Klappvisier zum Reinigen und Desinfizieren zu zerlegen. Nach dem Reinigungsvorgang können alle Bauteile wiederverwendet werden. Für die Reinigung und Desinfizierung können haushaltsübliche Mittel verwendet werden. Es können Mittel bis zu einem Alkoholanteil von 90 Prozent eingesetzt werden, ohne das Klappvisier zu beschädigen. Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Visiers ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden. Bei Anwendung des Klappvisiers im medizinischen Bereich können individuelle Vorschriften zur Desinfizierung des Klappvisiers bestehen. Bitte informieren Sie sich und befolgen Sie diese Vorschriften.

VERPACKUNGSGEHALT

1. Schutzvisier (Im Set AX MED PKM+1 ist ein Ersatzvisier im Lieferumfang enthalten)
2. Trägerband mit CE-Zeichen und Schaumgummi im Stirnbereich
3. 2 x Befestigungsschraube
4. 2 x Distanzring
5. 2 x Befestigungsmutter
6. Flexibles Gummiband
7. Montage- und Bedienungsanleitung



Mit dem CE Zeichen erklärt der Hersteller, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können jederzeit beim Hersteller angefordert werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

